



VILLE D'ANDENNE

La Ville d'Andenne prend
soin de votre santé


CORONAVIRUS - COVID19

VISIÈRES DE PROTECTION DU FABLAB D'ANDENNE

MESURES D'HYGIÈNE



Avant de manipuler un masque ou une visière, veillez à bien vous laver les mains selon les consignes d'hygiène en vigueur

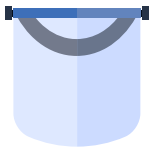


Lors de la première utilisation, enlevez le film de protection en plastique



La visière doit être désinfectée plusieurs fois par jour. Utilisez de l'alcool à 80° en spray.

Après 2-3 pulvérisations, laissez le produit agir 5 minutes. Ne frottez pas avec une serviette en papier.

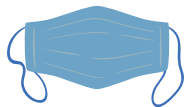

Les visières doivent être portées en complément d'un masque en tissu validé par les instances compétences.



Ne vous touchez pas le visage lors du port de la visière. Celle-ci peut donner une fausse impression de sécurité, mais la contamination pourrait se faire par les mains.



Ce masque est une création du FabLab d'Andenne
www.yourlab.be